

Beanstandungen:

behooben:
j/n/KV


Die Wartung wurde vollumfänglich durchgeführt und der Rollstuhl ist funktionstüchtig.

Termin der nächsten Wartung:
Monat/Jahr (jährliche Wartung)

Datum/Unterschrift

.....
(Rollstuhl Nutzer bzw. Vertreter)

.....
(Prüfungsverantwortlicher)

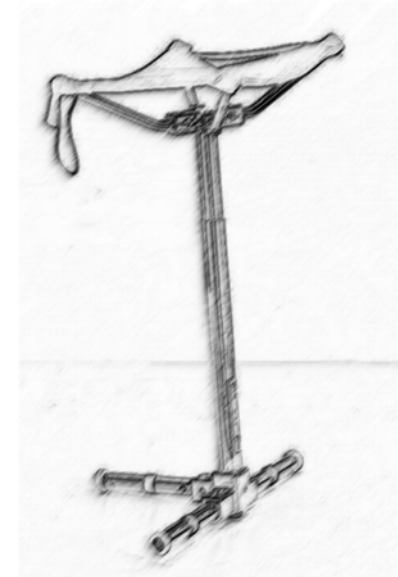

Handbuch Wartung 10.79M Molekula

Ausgabe 01/2021

Art. Nr.	LOT	SN

WARTUNG:

Die regelmäßige Prüfung der Funktionsfähigkeit und Sicherheit (Wartung) des Hilfsmittels stellen sicher, dass Nutzer und Helfer den Rollstuhl bestimmungsgerecht und sicher nutzen können. Die erste Wartung sollte **24 Monaten** nach Erstausslieferung erfolgen, die weiteren Wartungen sollten im Abstand von **12 Monaten** durchgeführt werden. Wenn sich während der Wartung Anzeichen für eine besondere Beanspruchung ergeben, kann der Prüfverantwortliche den Wartungsrhythmus verkürzen. Die Prüfungen und Wartungen müssen von Mitarbeitern des Fachhändlers, die für die Wartung und technische Prüfung von Elektrorollstühlen nachweislich ausgebildet sind, vorgenommen werden. Bei Prüfungsanforderungen, die ausschließlich Molekula betreffen, bietet der Hersteller entsprechende Schulungen an. Zwischen den Wartungsintervallen ist der Nutzer bzw. sind seine Betreuer verpflichtet, alle Obliegenheiten zu erfüllen, die der Hersteller für die Inverkehrbringung und Nutzung des Rollstuhls vorgibt (s. mitgeliefertes Handbuch: Sicht- und Funktionsprüfung etc.). Der Fachhändler weist den Nutzer/die Betreuer bei Auslieferung und Wartung in diese Verpflichtungen ein. Der Prüfungsverantwortliche erstellt nach jeder Wartung den Prüfbericht mit Stempel und Unterschrift. Die Prüfberichte sind aufzubewahren, damit jederzeit die lückenlose Wartung nachgewiesen werden kann.



Jeder Prüfbericht ist unverzichtbarer Bestandteil der Produktdokumentation, der über die Einsatzzeit des Rollstuhls bei dem den Rollstuhl betreuenden Fachhändler aufbewahrt werden muss. Diese Dokumentation ist bei einem Wechsel des Fachhändlers dem neuen betreuenden Fachhändler auszuhändigen. Die vorgesehene Einsatzzeit der Molekula ist 10 Jahre. Der Hersteller hat aufgrund der Verpflichtung zur Marktbeobachtung das Recht Kopien der Wartungsberichte anzufordern. Dieses Recht nimmt er über seine Niederlassung in Deutschland wahr:

Vassilli Deutschland GmbH, Am Hillpark 1, 32584 Löhne, Tel.: 05732 98350/98350/Fax: 05732 0983515, E-Mail: info@vassilli-deutschland.de

CHECKLISTE:

Vorarbeiten zur Sichtprüfung	
Ggf. Molekula vor der Sichtprüfung gereinigt.	<input type="checkbox"/>
Prüfung des Polsters	
Der Bezug ist unbeschädigt.	<input type="checkbox"/>
Die Nähte an den Ecken, die eingespannt werden, sind „wie neu“.	<input type="checkbox"/>
Prüfung Mast und Arme	
Der Mast ist nicht verbogen oder in einer die Funktion beeinträchtigen Weise beschädigt.	<input type="checkbox"/>
Die Arme sind vollständig und unbeschädigt.	<input type="checkbox"/>
Die Aufnahmen zur Befestigung der Arme sind unbeschädigt.	<input type="checkbox"/>
Die Federknöpfe an den Armen und am Mast (Höheneinstellung) funktionieren.	<input type="checkbox"/>
Prüfung drehende Basis und Füße	
Die Aufnahmen zur Befestigung der Füße sind unbeschädigt.	<input type="checkbox"/>
Die Federknöpfe an den Füßen funktionieren.	<input type="checkbox"/>
Die gelben Kunststoffringe an den Füßen sind unbeschädigt vorhanden.	<input type="checkbox"/>
Die Rädchen an den Füßen rechts bzw. links drehen sich unter maximaler Belastung (s. Typenschild).	<input type="checkbox"/>